

MEDIVATORS™

CLEANSCOPE™

System til transport og
kortvarig opbevaring



Beskyttet kortvarig
opbevaring af rene
endoskoper

Hjælper med at beskytte
udstyret mod skader


Tydelig identifikation af ren
og kontamineret

Reducerer risiko for
krydskontamination

LET AT SKELNE RENT UDSTYR FRA KONTAMINERET UDSTYR UNDER TRANSPORT OG OPBEVARING

CLEANASCOPE™ transport- og opbevaringssystem beskytter endoskoper og andet sart udstyr ved at minimere direkte håndtering og reducere kontakt med luftbårne, kontaminerende stoffer under transport og kortvarig opbevaring. Dets patentbeskyttede design danner et beskyttende miljø for hvert desinficeret endoskop. Grønne (rent) og røde (kontamineret) farvekodede betræk bruges til øjeblikkelig identifikation af rent eller kontamineret udstyr

- Procedure i tre dele med sterile engangsbetræk
- Vogne fås til to, fem, seks eller ti bakker

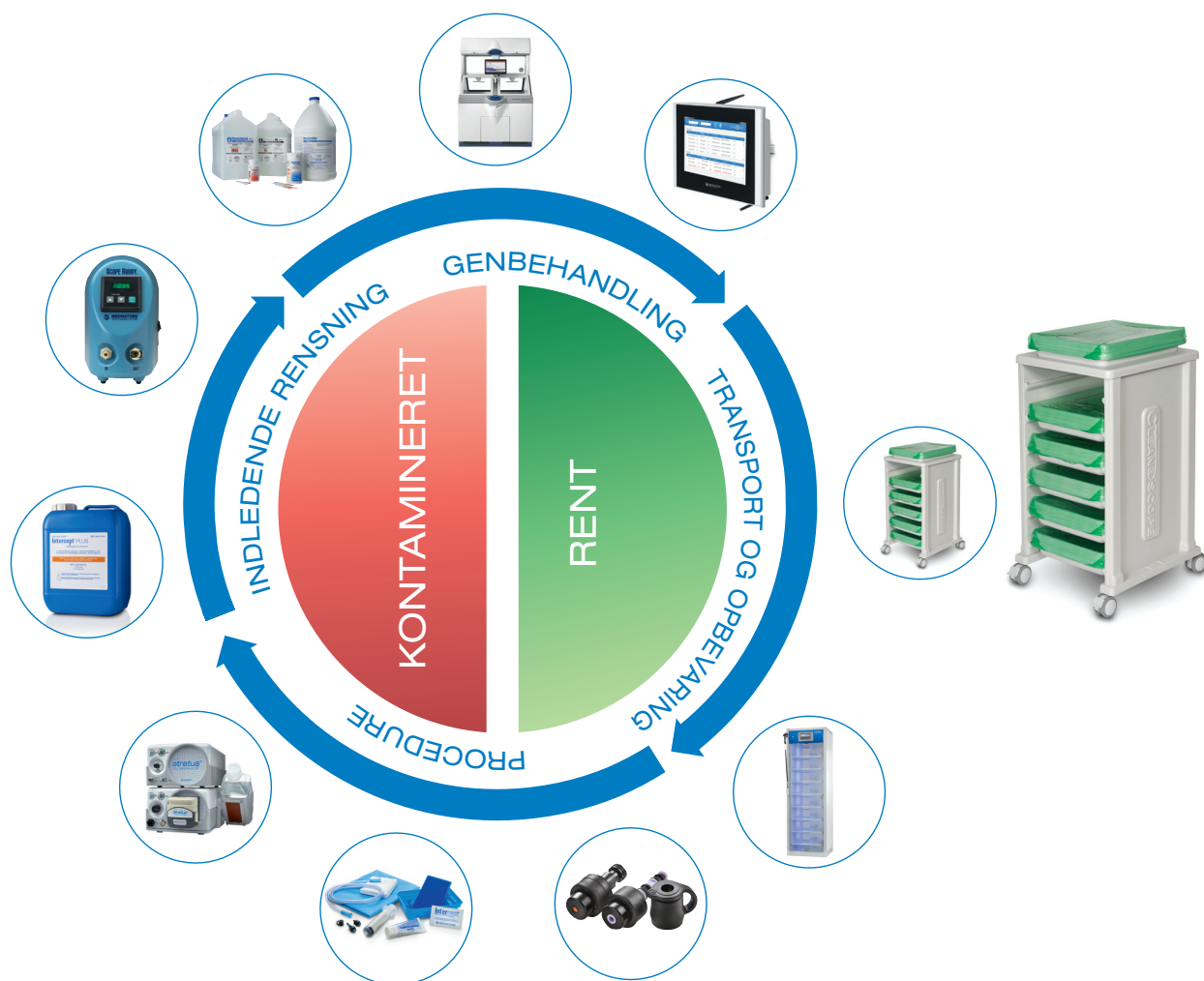

FRA ENDOSKOPVASKEMASKINE OG TILBAGE MED 4 NEMME TRIN:

1

Beklæd bakken med det sterile bundbetræk og sørg for, at de indvendige flader og kanterne er helt dækkede




2

Anbring det rene endoskop i bakken sammen med det sterile, røde betræk til senere brug



3

Dæk bakken med det sterile, grønne betræk benævnt "RENT", så det er nemt at se, at endoskopet er klar til patientbrug.

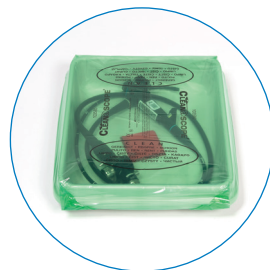

4

Efter proceduren gennemskylles og tørres endoskopet af og lægges i bakken. Dæk bakken med det røde betræk, der tydeligt indikerer, at udstyret er "KONTAMINERET".



"Betræksystemet er en af de vigtigste årsager til, at mange faciliteter implementerer CleanaScope-systemet – med de farvekodede betræk behøver man ikke gætte sig frem under genbehandling af endoskoperne"

Libby Thomson, tidligere oversygeplejerske ved screeningscenter for tarmkræft og endoskopisygeplejerske

EN MERE EFFEKTIV GENBEHANDLING AF ENDOSKOPER

Beskyttet, kortvarig opbevaring af rene endoskoper og rent udstyr

Faste låg fås til ekstra beskyttelse under transport uden for afdelingen

Fås med enten 2, 5, 6 eller 10 bakker

TYDELIG IDENTIFIKATION af "rent" og "kontamineret" udstyr



Robuste, genanvendelige bakker hjælper med at beskytte udstyret mod skader

Bakkerne passer perfekt ind i formen på toppen af vognen

Versioner med 2, 5 og 6 bakker giver ideel arbejds højde

Det STERILT indpakkede betræksystem reducerer risikoen for krydskontamination

"Transporter det snavsede endoskop til genbehandlingsområdet i en lukket beholder, der beskytter personale, patienter og omgivelser mod eksponering for potentielt smittefarlige organismer"

ASGE Quality Assurance in Endoscopy Committee, 2011 og SGNA Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible Gastrointestinal Endoscopes 2012

Produktspecifikationer CLEANASCOPE™ vogne og CLEANASCOPE™ betræk og tilbehør



Bestillingsinformation CLEANASCOPE vogne

Produkt Beskrivelse	Vare-nummer	Dimensioner	Antal pr. kasse/karton
Vogn med 6 bakker	103466	925 mm (H) x 520 mm (B) x 570 mm (D)	1
Vogn med 10 bakker	103467	1435 mm (H) x 520 mm (B) x 570 mm (D)	1
Vogn med 5 bakker	103470	800 mm (H) x 520 mm (B) x 570 mm (D)	1

Bestillingsinformation CLEANASCOPE betræk og tilbehør

Produkt Beskrivelse	Vare-nummer	Antal pr. kasse/karton
CLEANASCOPE sterilt betræksæt	103585	200 (røde og grønne betræk med bundbetræk)
Vægmonteret dispenser til engangsbetræk	103604	1
CLEANASCOPE bakke	103456	1
CLEANASCOPE bakkelåg	103457	1



Det originale og bedste system til transport/kortvarig opbevaring af endoskoper og andet sart udstyr

Produktbeskrivelse	CLEANASCOPE system	Andet overdækningssystem	Posesystem
Sterilt betræk	✓	✗	✗
Fast låg	✓	✗	✗
Genanvendelige bakker	✓	✓	✗
Transportvogn bygget til formålet	✓	✓	✗
Tætsiddende betræk der sikrer, at kontamination holdes ude/inde	✓	✗	✗
Bakke der helt understøtter vægten af et dyrt endoskop	✓	✓	✗
Læselig identifikation på betræk	✓	✗	✗

CLEANASCOPE™ er et varemærke, der tilhører Medivator International Limited
MEDIVATORS™ er et varemærke, der tilhører Medivators Inc.



Manufactured in the UK by:

Cantel Medical (UK) Limited
Campfield Road
Shoeburyness
Essex
SS3 9BX
UK
Tel: +44 (0) 1702 291878

Cantel Medical (UK) Limited
Wolsley House
Staffordshire Technology Park
Beaconside, Stafford ST18 0GA
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1785.782420
Fax: +44 (0) 1785.782421

Medivators BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.595

Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387

Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.
1A International Business Park
#05-01 Singapore 609933
Tel: +65.6227.9698
Fax: +65.6225.6848

Cantel Medical Devices (China) Co. Ltd.
Unit 804-805, Innov Tower Block A,
Hongmei Road, Xuhui 200233 Shanghai
Tel: +86 21 60161380
Fax: +86 21 61210913

www.medivators.eu

© 2016 Medivators Inc. 50098-969-DA/A